



sune
KOS



200

Producir
Elastina y Colágeno.
Al mismo tiempo.

THE ONE AND
ONLY WITH



Formula patentada* para facilitar la regeneración de la matriz extracelular, restaurar la elasticidad de la piel y los volúmenes naturales

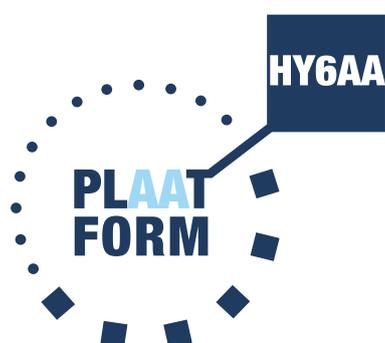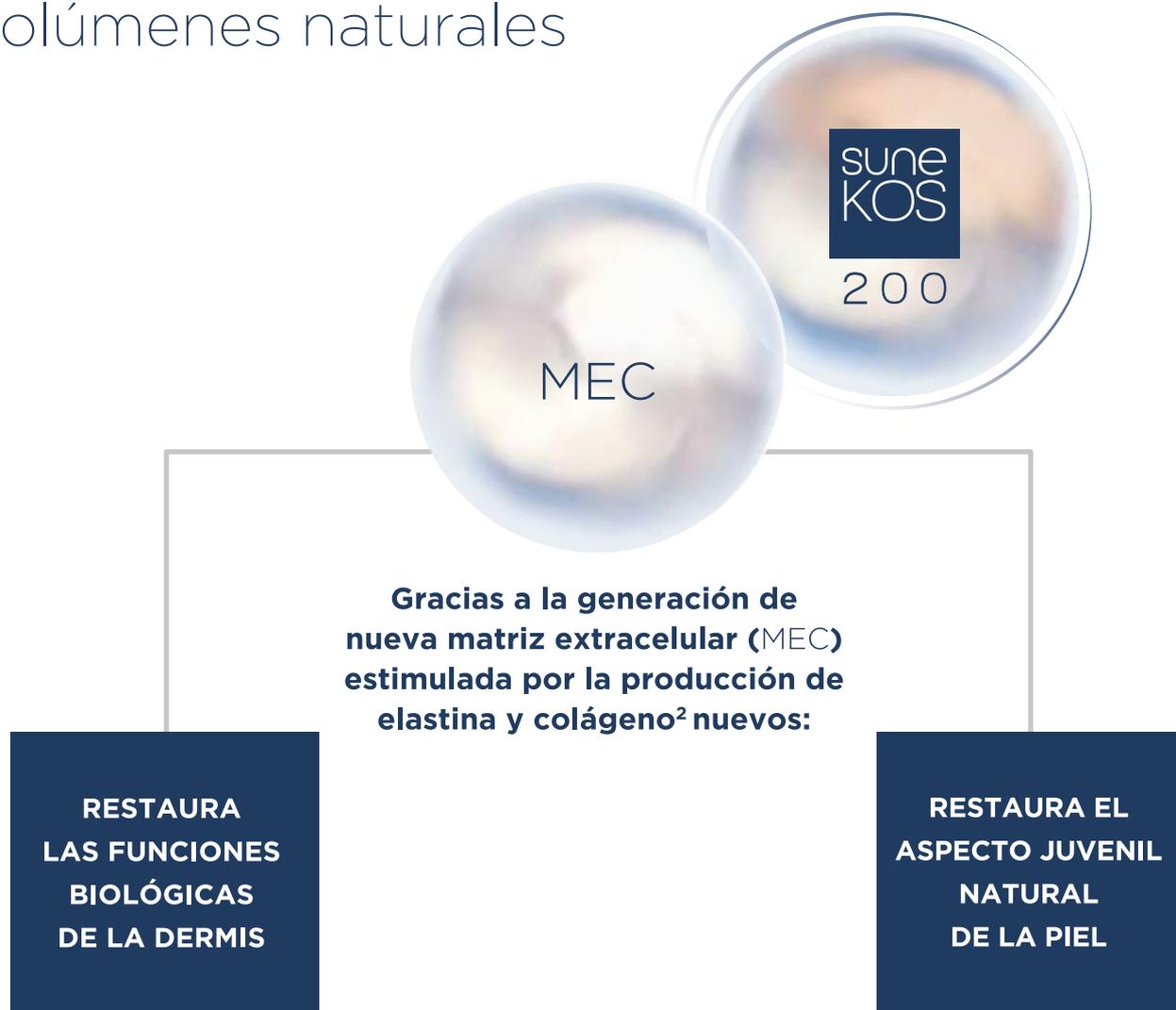


El resultado de un proceso bioquímico específico que identifica la composición precisa de **ácido hialurónico** y **aminoácidos** para asegurar la síntesis de las proteínas elastina y colágeno.


Ácido hialurónico	Principal componente del tejido conjuntivo
Glicina L-Prolina L-Lisina	Aminoácidos del colágeno
L-Alanina L-Valina	Aminoácidos de la elastina
L-Leucina	Aminoácidos que sintetizan proteínas

* Aplicación de la patente internacional PCT/IB2015

EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA TRAS 120 HORAS²

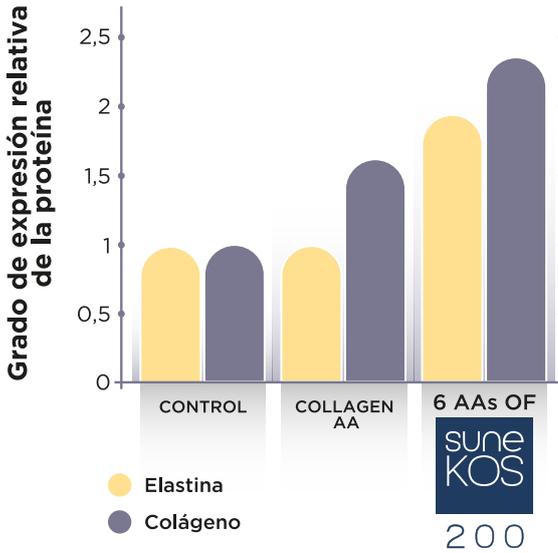


EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN DE LA ELASTINA HASTA 120 HORAS³

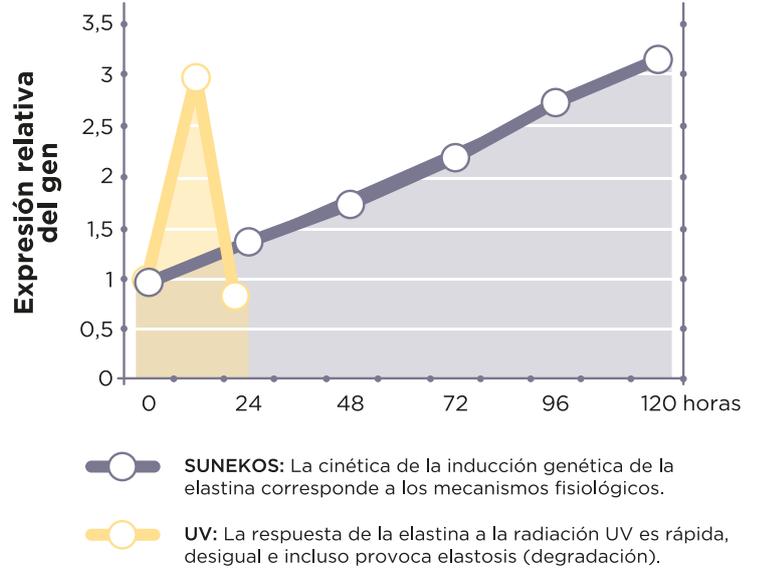


ALGORITMO DE TRATAMIENTO PARA ROSTRO COMPLETO



PÉRDIDA DE VOLUMEN FACIAL
(FVLS Escala fotográfica de Pérdida del Volumen Facial)

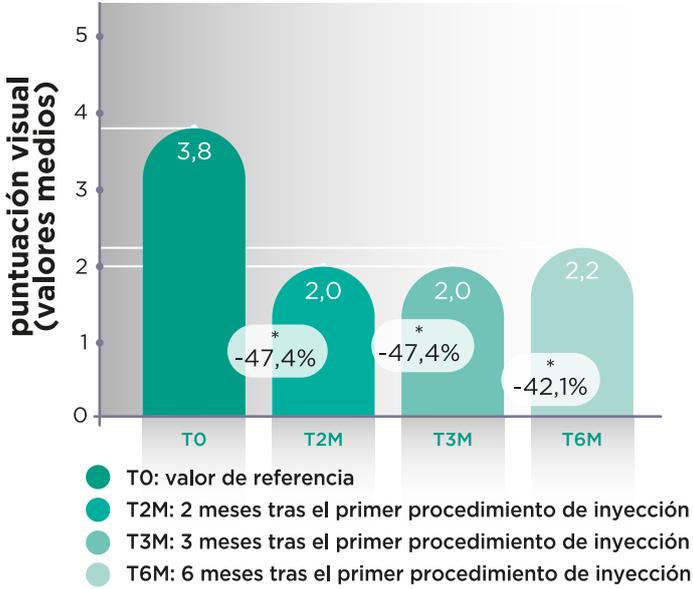

ÍNDICE DE PROFUNDIDAD DE LAS ARRUGAS
(WSRS Escala fotográfica de Pérdida del Volumen Facial)

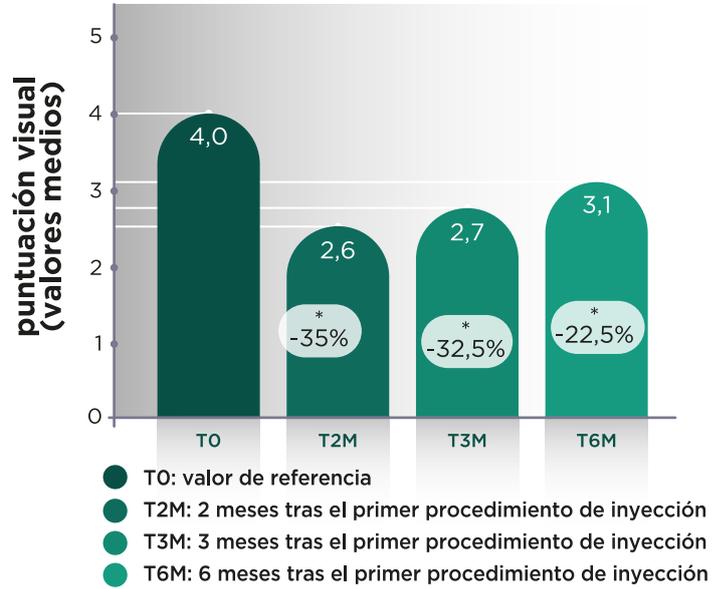

Disminución significativa en la puntuación de pérdida de volumen facial (FVLS) de los pliegues nasales y de las mejillas

EFFECTO BIORREVOLU-MÉTRICO¹


Reducción significativa de la puntuación en el índice de profundidad de las arrugas (WSRS) medido en las patas de gallo.

EFICACIA DEL RELLENO¹


Reducción significativa de todos los parámetros perfilométricos

EFICACIA ANTI-ARRUGAS

**CONSTANTE DIELECTRICA DEL TEJIDO
(HIDRATACIÓN DE LA DERMIS PROFUNDA)
FASE DE SEGUIMIENTO**

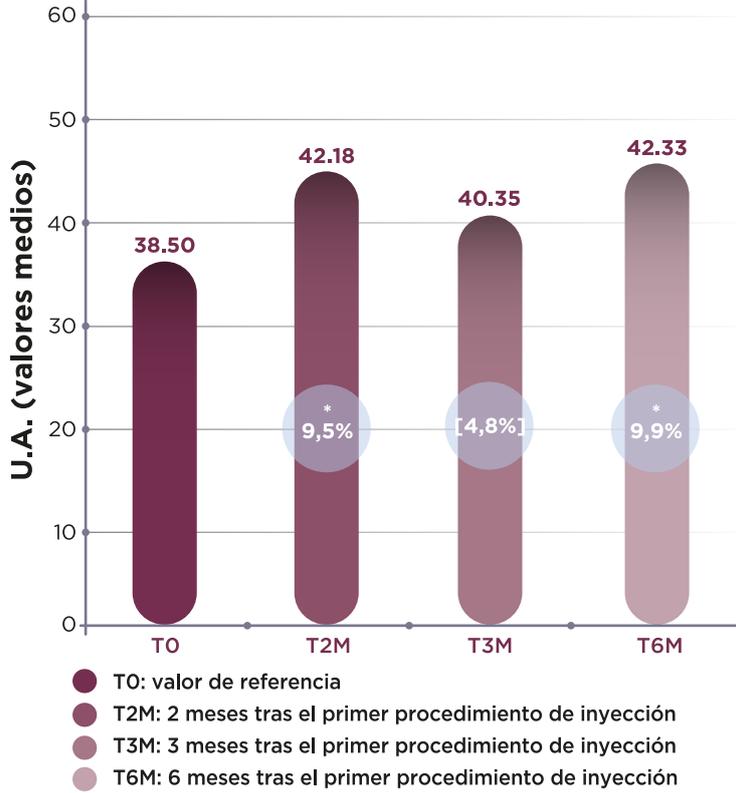

**CAPACITANCIA ELÉCTRICA DE LA PIEL
(HIDRATACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL)
FASE DE SEGUIMIENTO**

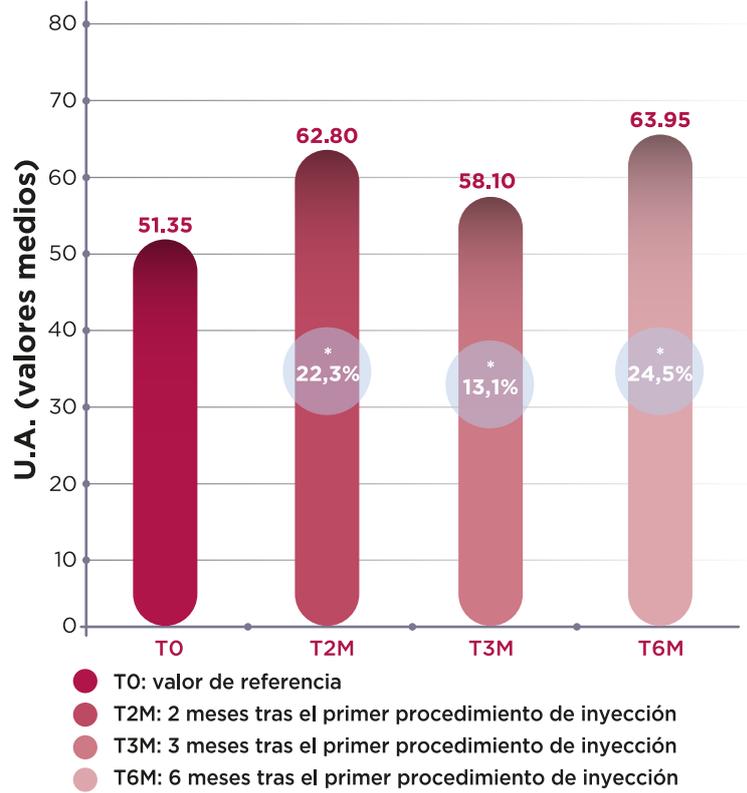

En los 10 días posteriores a la primera sesión de tratamiento se produce una significativa

MEJORA DE LA HIDRATACIÓN DE LA DERMIS PROFUNDA¹

En los 10 días posteriores a la primera sesión de tratamiento se produce una significativa

MEJORA DE LA HIDRATACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL QUE PERMANECE INCLUSO DESPUÉS DE 6 MESES¹

Reducción significativa de los parámetros torsiométricos después de 10 días a partir de la segunda o tercera sesión

EFFECTO VOLUMINIZADOR

- Agujas de 27-30G y 12-13 mm
- Inyección en la dermis media-profunda
- Inclinación de la aguja de 45°
- Serie de bolos: distancia de unos 1,5 cm
- 0,1 ml de inyección en cada punto
- Inyecciones en las direcciones del flujo
- Inyección en retrotrazado lineal (pliegues nasolabiales)
- Masaje siguiendo el flujo

La **IFT** se combina con el efecto de **dos acciones fundamentales** para el tratamiento de la matriz extracelular en la dermis:

1 Inyección en la dermis media-profunda

2 Drenaje linfático

Resultados del ensayo clínico



Protocolo de uso




Un ciclo de 4 inyecciones a intervalos de 7 a 10 días cada una. Repetir el ciclo 2 veces al año.

PREVENCIÓN


CARA REDONDA

JOVEN

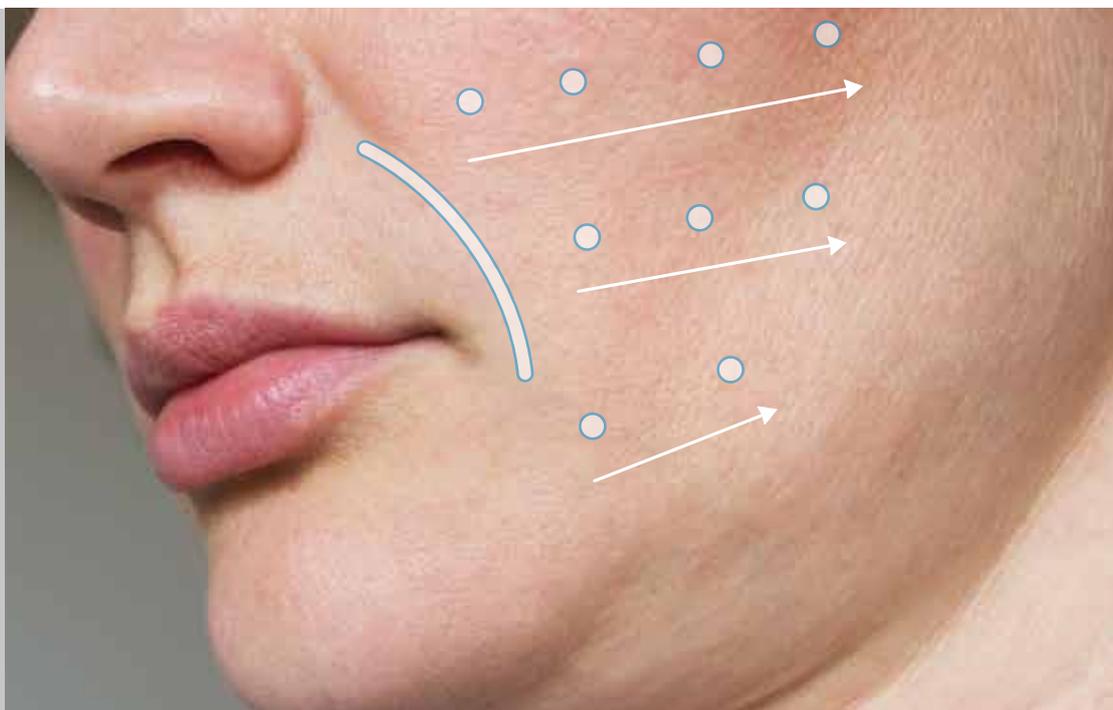

LIFTING

- La técnica IFT aprovecha el flujo del líquido intersticial
- Aguja de 27-30G y 12-13 mm
- Inyección en la dermis media-profunda
- Inclinación de la aguja de 45°
- Secuencia de inyecciones en la dirección del flujo
- Inyección de 0,1 ml por punto a una distancia aproximada de 1,5 cm
- Inyección en retrotrazado lineal (pliegues nasolabiales)
- Masaje siguiendo el flujo

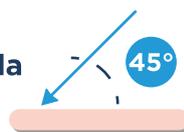

RIFT

REVERSE INTERSTITIAL
FLUID TECHNIQUE

- La secuencia de inyecciones va desde la periferia hacia el centro.
- A continuación, aplicar un ligero masaje con la yema de los dedos con el fin de ayudar y estimular el flujo fisiológico de los líquidos intersticiales, desde la periferia hacia el centro.

La técnica **RIFT** es una técnica de inyección que se aplica en **dirección opuesta** a los líquidos intersticiales.
Se aplica en zonas de disminución de volumen o sin volumen.

La **RIFT** ayuda a **distribuir** producto en la zona central del rostro y a **estimular** la neorregeneración de la matriz extracelular.

**EFFECTO
VOLUMINIZADOR
INMEDIATO**

Protocolo de uso



Un ciclo de 4 inyecciones a intervalos de 7 a 10 días cada una. Repetir el ciclo 2 veces al año.




200

RIFT
REVERSE INTERSTITIAL
FLUID TECHNIQUE

PREVENCIÓN


CARA DELGADA/ALARGADA

JOVEN

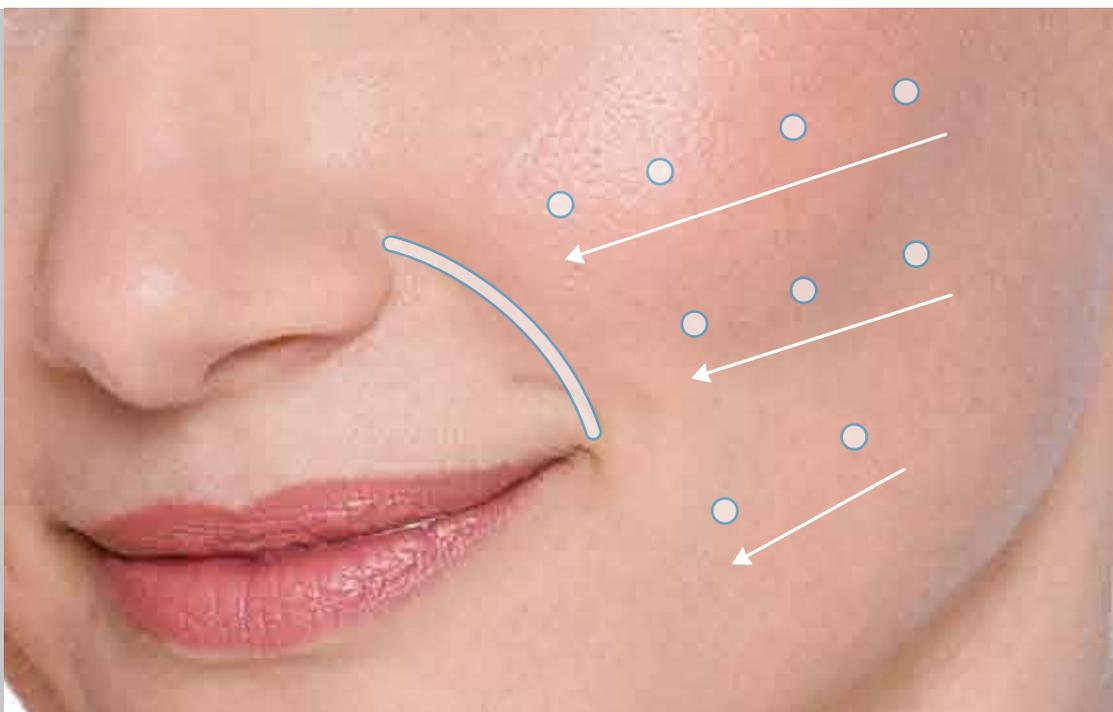


VOLUMINIZADOR

- Aguja de 27-30G y 12-13 mm
- Inyección en la dermis media-profunda
- Inclinación de la aguja de 45°
- La secuencia de inyecciones va en contra del flujo
- Inyección de 0,1 ml por punto a una distancia aproximada de 1,5 cm
- Inyección en retrotrazado lineal (pliegues nasolabiales)
- Masaje en dirección opuesta al flujo

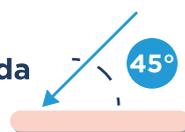

COMBINADOS

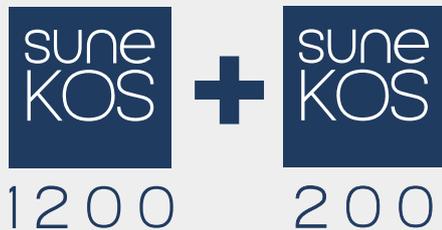

Un ensayo interno compara 2 grupos de pacientes con piel flácida, el primero de ellos se trató solo con S200 y el segundo se trató al principio con S1200+S200, a modo de **“cushion”** seguido del tratamiento estándar S200, lo cual dio los siguientes resultados:

Medida del
volumen facial en cc

+24%

Mejora del FVLS
(Escala fotográfica
de Pérdida del
Volumen Facial)

+33%

Protocolo de uso


A

1 tratamiento de Sunekos® 1200 como andamio seguido, el mismo día o no más tarde de 1 o 2 días después, de 4 tratamientos de Sunekos® 200 a intervalos de 7 a 10 días cada uno.



B

Mantenimiento con 1 tratamiento de Sunekos® 1200 + 1 tratamiento Sunekos® 200. Repetir después de 4 y 7 meses desde la aplicación del primer tratamiento.

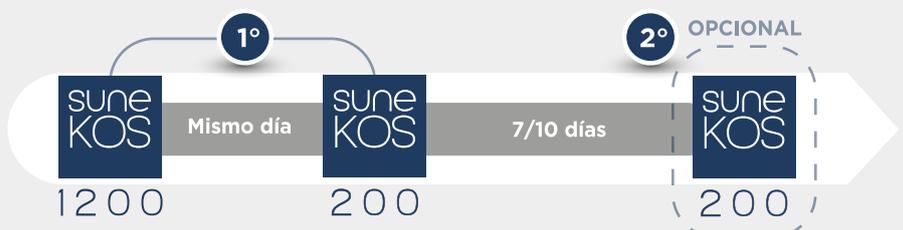

PIEL DESCOLGADA
CARA REDONDA CON ARRUGAS
MADURA




LIFTING

CUSHION
TECHNIQUE



IFT
INTERSTITIAL
FLUID TECHNIQUE

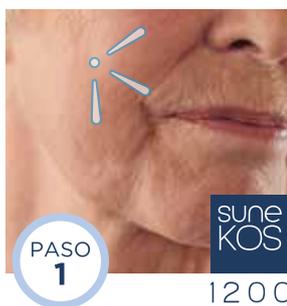

PASO
1

1200

sune
KOS

- Cánula de 25G y 40-50 mm
- Inyección en la dermis profunda
- Técnica en abanico



PASO
2

200

sune
KOS

- Aguja de 27-30G y 12-13 mm
- Inyección en la dermis media-profunda
- Secuencia de inyecciones en la dirección del flujo
- Inyección de 0,1 ml por punto a una distancia aproximada de 1,5 cm
- Inclinación de la aguja de 45°
- Inyección en retrotrazado lineal (pliegues nasolabiales)
- Masaje en la dirección del flujo



ARRUGAS PRONUNCIADAS
CARA CON ARRUGAS/
SIN VOLUMEN
MADURA




VOLUMINIZADOR

CUSHION
TECHNIQUE




RIFT
REVERSE INTERSTITIAL
FLUID TECHNIQUE

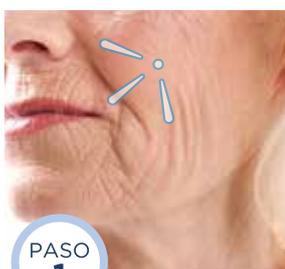

PASO
1

- Cánula de 25G y 40-50 mm
- Inyección en la dermis profunda
- Técnica en abanico

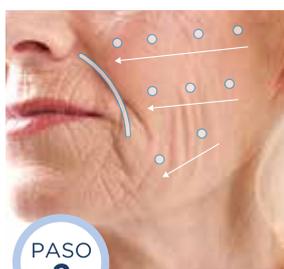

PASO
2

- Aguja de 27-30G y 12-13 mm
- Inyección en la dermis media-profunda
- La secuencia de inyecciones va en contra del flujo
- Inyección de 0,1 ml a una distancia de 1,5 cm
- Inclinación de la aguja de 45°
- Inyección en retrotrazado lineal (pliegues nasolabiales)
- Masaje en dirección opuesta al flujo





FRENTE

OJERAS Y BOLSAS

ROSTRO COMPLETO

CUELLO

ESCOTE

MANOS



2 viales estériles de ácido hialurónico (200 kD) y
2 viales de aminoácidos liofilizados estériles
Un pack de Sunekos® 200
contiene 2 tratamientos de 3 ml cada uno.

1 frasco de ácido hialurónico de elevado
peso molecular (1200 kD)
Hialuronato de sodio en gel estéril y
1 frasco con una solución estéril de aminoácidos
Un pack de Sunekos® 1200
contiene 1 tratamiento de 3 ml.

Distribuidor oficial

reallasting

FUTURE SOLUTIONS BROUGHT TODAY

-

E. info@reallasting.com | W. reallasting.com | T. +34 93 697 78 25



Descargue todas las técnicas de inyección y los protocolos

CE 0373
Class III Medical Device

1. Sparavigna A and Orlandini A Efficacy and Tolerance of an Injectable Medical Device Containing Hyaluronic Acid and Amino acids: A Monocentric Six-Month Open-Label Evaluation J Clin Trials, an open access journal ISSN:2167-0870 Volume 7 • Issue 4 • 1000316
2. De Servi B, Orlandini A, Caviola E, Meloni M (2016) Amino acids and hyaluronic acid mixtures differentially regulate extra cellular matrix genes in cultured human fibroblast (Ahead of Print) PCT/IB2015/059330
3. Meloni M et al. Photochem Photobiol Sci 2010 Apr, 9(4): 439-47

Material destinado exclusivamente a uso médico.

D. SUDM 140119 REV.02 - ES